

BS-Spange : Correction Innovante des Ongles

Vous utilisez encore des ressorts métalliques, des clips ou des fils métalliques difficiles à former pour corriger les ongles ? Ce n'est plus nécessaire ! Le système BS-Spange offre une solution moderne et facile pour les ongles incarnés. Les bandes en plastique BS-Spange peuvent être appliquées directement, même sur des sillons abîmés ou des ongles profondément incarnés. Plus besoin de glisser des dispositifs métalliques sous le bord libre de l'ongle.

Comment fonctionne le BS-Spange ?

Les bandes BS-Spange sont de fines lamelles plates en plastique qui sont collées sur toute la surface de l'ongle. Cette technique répartit la force de tension uniformément sur l'ongle. Résultat : un soulagement immédiat de la douleur due à la pression, et à long terme, une correction de la direction de croissance de l'ongle. Cela prévient l'incarnation et soulage les sillons douloureux.

Finition Cosmétique

Après application, une légère surélévation peut apparaître sur l'ongle. Celle-ci peut être lissée en remplissant les bords de la bande avec de la colle, en limant et, si nécessaire, en appliquant un vernis. Pour une finition complètement lisse, utilisez des techniques en gel UV ou en acrylique.

Variantes de BS-Spange

Bernd Stolz GmbH (BS) propose différentes versions pour répondre à divers besoins :

- **BS-Spange Classic** : Bandes standard, faciles à appliquer avec un applicateur.
- **BS-Spange H-forme** : Bandes avec zones d'adhérence supplémentaires aux extrémités pour une fixation renforcée.
- **BS-Spange Quick** : Bandes plus épaisses avec un film applicateur pour une pose rapide et précise.
- **BS-Spange Magnet** : Bandes magnétiques (3 mm et 4 mm de large) à utiliser avec un applicateur magnétique.
- **BS-Spange +** : Bandes magnétiques améliorées de 4 mm de large.

Instructions d'Utilisation pour BS-Spange Classic

L'application du BS-Spange est simple et se fait en 7 étapes :

1. **Préparation**
 - Aplanissez autant que possible la surface de l'ongle.
 - Mesurez la largeur de l'ongle et sélectionnez une bande adaptée qui laisse au moins 1,5 mm de dégagement des sillons.
2. **Choix de la taille**
 - Rugez légèrement le côté adhésif de la bande avec une fraise blanche (type émeri) pour améliorer l'adhérence.
3. **Dégraissage**
 - Nettoyez l'ongle avec le produit BS Clean Ex et une compresse en cellulose non pelucheuse.
4. **Séchage**
 - Séchez soigneusement l'ongle avec le stylo BS Aktivator.

5. Collage et application

- Appliquez une goutte de colle BS-Spange sur la bande et placez-la centrée sur l'ongle. Appuyez d'abord au centre avec l'applicateur, puis sur les extrémités.

6. Fixation

- Fixez fermement la bande en l'appuyant quelques secondes avec le côté creux de l'applicateur.

7. Traitement final

- Finalisez avec la colle BS-Spange et limez pour égaliser. Vous pouvez également finir avec de l'acrylique ou du gel UV.
-

BS-Spange Quick et Magnet

Pour un traitement encore plus efficace, les BS-Spange Quick et Magnet offrent des méthodes d'application améliorées :

- **Quick** : Livrées avec un film applicateur, rendant les repères au crayon inutiles.
- **Magnet** : Application avec un applicateur magnétique pour une précision optimale.

Traitement final :

Traitez les bandes comme pour la méthode Classic. Pour une finition esthétique, vous pouvez vernir ou utiliser un gel UV.

Avec BS-Spange, profitez d'une correction des ongles efficace et confortable, offrant une solution à la fois fonctionnelle et esthétique !