

BS-Spange: Innovatieve Nagelcorrectie

Werk je nog met stalen veren, clips of moeizaam gevormde stalen draad voor nagelbeugels? Dat hoeft niet meer! De BS-Spange biedt een moderne, eenvoudige oplossing voor ingegroeide nagels. De kunststof spannerstrips zijn direct toepasbaar, zelfs bij verwonde nagelwallen en diep ingegroeide teennagels. Geen gedoe meer met metaal onder de nagelrand.

Hoe werkt de BS-Spange?

De BS-Spange strips zijn dunne, vlakke kunststof bladveertjes die met het volledige oppervlak op de nagel worden gelijmd. Hierdoor verdeelt de veerkracht zich gelijkmatig over de nagel. Het resultaat? Directe verlichting van drukpijn en op termijn een betere groeirichting van de nagel. Dit voorkomt verdere ingroei en pijnlijke nagelwallen.

Cosmetische Afwerking

Na plaatsing ontstaat een lichte verhoging op de nagel. Deze kun je afwerken door de randen van de strip met lijm op te vullen, te vijlen en eventueel te lakken. Voor een volledig gladde afwerking gebruik je acryl- of UV-geltechnieken.

BS-Spange Variaties

Bernd Stolz GmbH (BS) biedt verschillende modellen om aan diverse behoeften te voldoen:

- **BS-Spange Classic:** Standaard strips, eenvoudig te plaatsen met een applicator.
 - **BS-Spange H-vorm:** Extra hechtvlakken aan de uiteinden voor stevige bevestiging.
 - **BS-Spange Quick:** Dikkere strips met aanbrengfolie voor snel en precies plaatsen.
 - **BS-Spange Magnet:** Magnetische strips (3 mm en 4 mm breed) voor gebruik met een magneetapplicator.
 - **BS-Spange +:** Verbeterde magnetische strips van 4 mm breed.
-

Gebruiksaanwijzing voor de BS-Spange Classic

Het aanbrengen van de BS-Spange is eenvoudig en verloopt in 7 stappen:

1. **Vorbereiding**
 - Maak de nagelplaat zo vlak mogelijk.
 - Meet de breedte van de nagel en kies een passende strip die minimaal 1,5 mm vrij laat bij de nagelwallen.
2. **Juiste maat kiezen**
 - Ruw de plakzijde van de strip licht op met een witte amaril-frees voor betere hechting.
3. **Ontvetten**
 - Reinig de nagel intensief met BS Clean Ex en een vezelvrije celstofdepper.
4. **Drogen**
 - Droog de nagel grondig met de BS Aktivator Stift.
5. **Lijmen en aanbrengen**
 - Breng een druppel Spange-lijm aan op de strip en plaats deze gecentreerd over de nagel. Druk eerst het midden aan met de applicator, gevolgd door de uiteinden.
6. **Vastzetten**

- Bevestig de strip stevig door deze enkele seconden aan te drukken met de holle zijde van de applicator.

7. Nabehandeling

- Werk de strip af met BS Spange-lijm en vijlen. Optioneel kan de nagel worden afgewerkt met acryl of gel.
-

BS-Spange Quick en Magnet

Voor een efficiëntere behandeling bieden de BS-Spange Quick en Magnet verbeterde plaatsingsmethodes:

- **Quick:** Inclusief aanbrengfolie, waardoor een potloodstreepje overbodig is.
- **Magnet:** Plaatsing met een magneetapplicator voor maximale precisie.

Nabehandeling:

Behandel strips zoals bij de Classic-methode. Voor cosmetische afwerking kan de nagel worden gelakt of bewerkt met UV-gel.

Met BS-Spange geniet je van een efficiënte en comfortabele nagelcorrectie, die niet alleen functioneel, maar ook esthetisch een uitstekende oplossing biedt!